

Technische Datenblätter

Aenderung Nr.00 vom 07/11/2022
Mod. 71-A11-DE


PBS 2



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen. Modell entwickelt für Arbeitstationen, wo wenig Abfälle produziert werden (Pflegetablett, Wagen, Arztpraxis, Privathäuser)

- ▶ **Rohstoff:** Umweltfreundlicher Kunststoff (Polypropylene Copolymer mit Cadmiumfreiem Masterbatch gefärbt)
- ▶ **Farbe:** Gelb (Material mit schwermetallfreiem Masterbatch gefärbt) (REACH-Konform)
- ▶ **Form:** Zylinderform
- ▶ **Gewicht:** 187 gr.
- ▶ **Maximale Befüllung:** 1.200 gr.
- ▶ **Volumen:** 2,0 Lt
- ▶ **Aussenmass:** Ø 140 x 210 H mm (mit Deckel montiert und geschlossen)
- ▶ **Basis:** Ø 106 mm

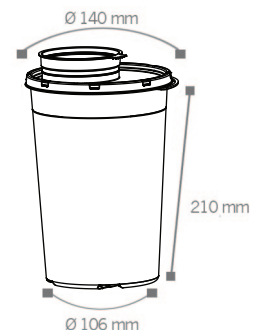

LOGISTISCHE DETAILS:

- ▶ **St pro Karton:** 75 (Gefäss mit separatem Deckel)
- ▶ **Verpackungsmass:** 60x41x44 H cm
- ▶ **St pro Palette:** 1200 pz.
- ▶ **Palettenmass:** 121x83x193 h cm

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ▶ UN-Zulassung - gemäss auf ADR
- ▶ Konform TRBA 250
- ▶ Konform ISO 23907-1 Kite Mark
- ▶ Konform Marque NF
- ▶ Konform FDA K071517

ANWEISUNGEN:

► Montage:

Stark auf die Oberfläche des Deckels drücken, bis alle Raster eingehakt sind.



► Provisorischer Verschluss:

Der Behälter kann provisorisch geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach oben schliessen.



GEBRAUCHSANLEITUNGEN:

► Während des Gebrauchs, schliessen Sie den Deckel provisorisch.



Wichtig!

Bevor den Behälter zu gebrauchen, drücken Sie auf die Sicherheitslamelle, um die Einführung der Abfällen zu erleichtern. Die Lamelle verhindern das Rücklauf der entsorgten Materialien.



► Endgültiger Verschluss:

Der Behälter kann endgültig geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach unten schliessen.



► Wenn der Behälter voll ist, schliessen Sie den Deckel endgültig.




- Breite Öffnung für die Entsorgung verschiedener Abfalltypen, z.B. Teströhrchen, Skalpelln, u.s.w.
- Der Behälter kann auf 134 °C für 18' autoklaviert werden
- Wenn der Behälter voll ist, muss den verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden keine giftige Gase freigesetzt.

► Nadelentsorgung:

Benutzen Sie die spezielle Öffnung für die Nadelentnahme

Benutzen Sie die Öffnung in Form einer Blume um die Insulinkanüle abzuschrauben.

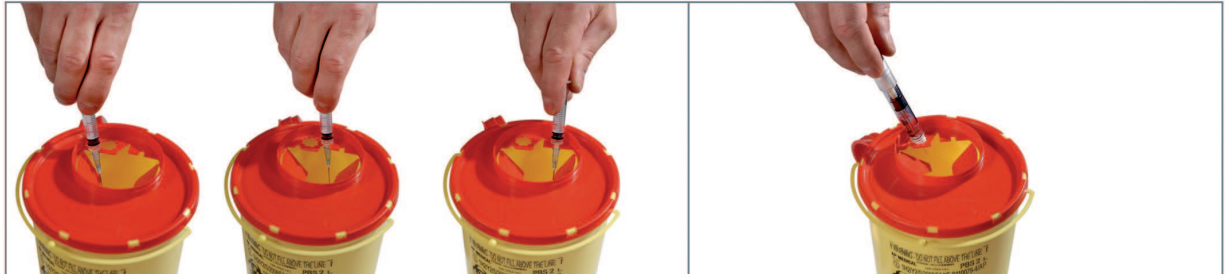

HALTERUNGEN:

► Zange-Halterung für Verwendung auf der Wand oder auf der Wagen.

► Tisch-Tablette mit Raum für PBS 0,8

► Saugnapfhalterung



VORTEILE:

- Sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben.
- Falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reißt die Lasche ab.
- Stich-und-schnittfest
- Mit Griff ausgestattet
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentnahme.
- Auf 134 °C autoklavierbar (mit Bewahrung der Eigenschaften des Gesetzes ISO 23907-1:2019)
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Endgültiger Verschluss
- Halterungen zur Verfügung
- Entsorgung bei Verbrennung, ohne giftigen Gase freizusetzen.

SICHERHEITSVORSCHLÄGE:

- Verwenden Sie den Behälter nicht vor Montierung des Deckels
- Versuchen Sie nicht, die entsorgten Materialien nach der Entsorgung zu entnehmen
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
- Verschliessen Sie den Behälter nur mit dem dazugehörigen Deckel
- Versuchen Sie nicht, den bereits endgültig verschlossenen Behälter wieder zu öffnen
- Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen
- Entsorgen Sie nach den geltenden Rechtsvorschriften
- Nutzen Sie den Griff zum Transport des Behälters